

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

HostCall-NameEditor

Руководство пользователя

Версия 01/18

Москва

2018

Работа с программой «HostCall-NameEditor»

При запуске программы на экране появляется главное окно программы «HostCall-NameEditor» (рис.1).

Программирование названий помещений и кнопок - C:\Docs\Table1.csv

Порт: COM3

№	Помещение	Кнопка 1	Кнопка 2	Кнопка 3	Кнопка 4	Кнопка 5	Кнопка 6	Кнопка 7	Кнопка 8	Кнопка 9
1	ПАЛАТА1	ПАЛАТА1-Койка1	ПАЛАТА1-Койка2	ПАЛАТА1-Койка3	ПАЛАТА1-Койка4	ПАЛАТА1-Койка5	ПАЛАТА1-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА1-ДУШ	ПАЛАТА1-Присутс	ПАЛАТА1-ВРАЧ
2	ПАЛАТА2	ПАЛАТА2-Койка1	ПАЛАТА2-Койка2	ПАЛАТА2-Койка3	ПАЛАТА2-Койка4	ПАЛАТА2-Койка5	ПАЛАТА2-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА2-ДУШ	ПАЛАТА2-Присутс	ПАЛАТА2-ВРАЧ
3	ПАЛАТА3	ПАЛАТА3-Койка1	ПАЛАТА3-Койка2	ПАЛАТА3-Койка3	ПАЛАТА3-Койка4	ПАЛАТА3-Койка5	ПАЛАТА3-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА3-ДУШ	ПАЛАТА3-Присутс	ПАЛАТА3-ВРАЧ
4	ПАЛАТА4	ПАЛАТА4-Койка1	ПАЛАТА4-Койка2	ПАЛАТА4-Койка3	ПАЛАТА4-Койка4	ПАЛАТА4-Койка5	ПАЛАТА4-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА4-ДУШ	ПАЛАТА4-Присутс	ПАЛАТА4-ВРАЧ
5	ПАЛАТА5	ПАЛАТА5-Койка1	ПАЛАТА5-Койка2	ПАЛАТА5-Койка3	ПАЛАТА5-Койка4	ПАЛАТА5-Койка5	ПАЛАТА5-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА5-ДУШ	ПАЛАТА5-Присутс	ПАЛАТА5-ВРАЧ
6	ПАЛАТА6	ПАЛАТА6-Койка1	ПАЛАТА6-Койка2	ПАЛАТА6-Койка3	ПАЛАТА6-Койка4	ПАЛАТА6-Койка5	ПАЛАТА6-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА6-ДУШ	ПАЛАТА6-Присутс	ПАЛАТА6-ВРАЧ
7	ПАЛАТА7	ПАЛАТА7-Койка1	ПАЛАТА7-Койка2	ПАЛАТА7-Койка3	ПАЛАТА7-Койка4	ПАЛАТА7-Койка5	ПАЛАТА7-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА7-ДУШ	ПАЛАТА7-Присутс	ПАЛАТА7-ВРАЧ
8	ПАЛАТА8	ПАЛАТА8-Койка1	ПАЛАТА8-Койка2	ПАЛАТА8-Койка3	ПАЛАТА8-Койка4	ПАЛАТА8-Койка5	ПАЛАТА8-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА8-ДУШ	ПАЛАТА8-Присутс	ПАЛАТА8-ВРАЧ
9	ПАЛАТА9	ПАЛАТА9-Койка1	ПАЛАТА9-Койка2	ПАЛАТА9-Койка3	ПАЛАТА9-Койка4	ПАЛАТА9-Койка5	ПАЛАТА9-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА9-ДУШ	ПАЛАТА9-Присутс	ПАЛАТА9-ВРАЧ
10	ПАЛАТА10	ПАЛАТА10-Койка1	ПАЛАТА10-Койка2	ПАЛАТА10-Койка3	ПАЛАТА10-Койка4	ПАЛАТА10-Койка5	ПАЛАТА10-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА10-ДУШ	ПАЛАТА10-Присутс	ПАЛАТА10-ВРАЧ
11	ПАЛАТА11	ПАЛАТА11-Койка1	ПАЛАТА11-Койка2	ПАЛАТА11-Койка3	ПАЛАТА11-Койка4	ПАЛАТА11-Койка5	ПАЛАТА11-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА11-ДУШ	ПАЛАТА11-Присутс	ПАЛАТА11-ВРАЧ
12	ПАЛАТА12	ПАЛАТА12-Койка1	ПАЛАТА12-Койка2	ПАЛАТА12-Койка3	ПАЛАТА12-Койка4	ПАЛАТА12-Койка5	ПАЛАТА12-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА12-ДУШ	ПАЛАТА12-Присутс	ПАЛАТА12-ВРАЧ
13	ПАЛАТА13	ПАЛАТА13-Койка1	ПАЛАТА13-Койка2	ПАЛАТА13-Койка3	ПАЛАТА13-Койка4	ПАЛАТА13-Койка5	ПАЛАТА13-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА13-ДУШ	ПАЛАТА13-Присутс	ПАЛАТА13-ВРАЧ
14	ПАЛАТА14	ПАЛАТА14-Койка1	ПАЛАТА14-Койка2	ПАЛАТА14-Койка3	ПАЛАТА14-Койка4	ПАЛАТА14-Койка5	ПАЛАТА14-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА14-ДУШ	ПАЛАТА14-Присутс	ПАЛАТА14-ВРАЧ
15	ПАЛАТА15	ПАЛАТА15-Койка1	ПАЛАТА15-Койка2	ПАЛАТА15-Койка3	ПАЛАТА15-Койка4	ПАЛАТА15-Койка5	ПАЛАТА15-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА15-ДУШ	ПАЛАТА15-Присутс	ПАЛАТА15-ВРАЧ
16	ПАЛАТА16	ПАЛАТА16-Койка1	ПАЛАТА16-Койка2	ПАЛАТА16-Койка3	ПАЛАТА16-Койка4	ПАЛАТА16-Койка5	ПАЛАТА16-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА16-ДУШ	ПАЛАТА16-Присутс	ПАЛАТА16-ВРАЧ
17	ПАЛАТА17	ПАЛАТА17-Койка1	ПАЛАТА17-Койка2	ПАЛАТА17-Койка3	ПАЛАТА17-Койка4	ПАЛАТА17-Койка5	ПАЛАТА17-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА17-ДУШ	ПАЛАТА17-Присутс	ПАЛАТА17-ВРАЧ
18	ПАЛАТА18	ПАЛАТА18-Койка1	ПАЛАТА18-Койка2	ПАЛАТА18-Койка3	ПАЛАТА18-Койка4	ПАЛАТА18-Койка5	ПАЛАТА18-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА18-ДУШ	ПАЛАТА18-Присутс	ПАЛАТА18-ВРАЧ
19	ПАЛАТА19	ПАЛАТА19-Койка1	ПАЛАТА19-Койка2	ПАЛАТА19-Койка3	ПАЛАТА19-Койка4	ПАЛАТА19-Койка5	ПАЛАТА19-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА19-ДУШ	ПАЛАТА19-Присутс	ПАЛАТА19-ВРАЧ
20	ПАЛАТА20	ПАЛАТА20-Койка1	ПАЛАТА20-Койка2	ПАЛАТА20-Койка3	ПАЛАТА20-Койка4	ПАЛАТА20-Койка5	ПАЛАТА20-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА20-ДУШ	ПАЛАТА20-Присутс	ПАЛАТА20-ВРАЧ
21	ПАЛАТА21	ПАЛАТА21-Койка1	ПАЛАТА21-Койка2	ПАЛАТА21-Койка3	ПАЛАТА21-Койка4	ПАЛАТА21-Койка5	ПАЛАТА21-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА21-ДУШ	ПАЛАТА21-Присутс	ПАЛАТА21-ВРАЧ
22	ПАЛАТА22	ПАЛАТА22-Койка1	ПАЛАТА22-Койка2	ПАЛАТА22-Койка3	ПАЛАТА22-Койка4	ПАЛАТА22-Койка5	ПАЛАТА22-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА22-ДУШ	ПАЛАТА22-Присутс	ПАЛАТА22-ВРАЧ
23	ПАЛАТА23	ПАЛАТА23-Койка1	ПАЛАТА23-Койка2	ПАЛАТА23-Койка3	ПАЛАТА23-Койка4	ПАЛАТА23-Койка5	ПАЛАТА23-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА23-ДУШ	ПАЛАТА23-Присутс	ПАЛАТА23-ВРАЧ
24	ПАЛАТА24	ПАЛАТА24-Койка1	ПАЛАТА24-Койка2	ПАЛАТА24-Койка3	ПАЛАТА24-Койка4	ПАЛАТА24-Койка5	ПАЛАТА24-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА24-ДУШ	ПАЛАТА24-Присутс	ПАЛАТА24-ВРАЧ
25	ПАЛАТА25	ПАЛАТА25-Койка1	ПАЛАТА25-Койка2	ПАЛАТА25-Койка3	ПАЛАТА25-Койка4	ПАЛАТА25-Койка5	ПАЛАТА25-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА25-ДУШ	ПАЛАТА25-Присутс	ПАЛАТА25-ВРАЧ
26	ПАЛАТА26	ПАЛАТА26-Койка1	ПАЛАТА26-Койка2	ПАЛАТА26-Койка3	ПАЛАТА26-Койка4	ПАЛАТА26-Койка5	ПАЛАТА26-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА26-ДУШ	ПАЛАТА26-Присутс	ПАЛАТА26-ВРАЧ
27	ПАЛАТА27	ПАЛАТА27-Койка1	ПАЛАТА27-Койка2	ПАЛАТА27-Койка3	ПАЛАТА27-Койка4	ПАЛАТА27-Койка5	ПАЛАТА27-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА27-ДУШ	ПАЛАТА27-Присутс	ПАЛАТА27-ВРАЧ
28	ПАЛАТА28	ПАЛАТА28-Койка1	ПАЛАТА28-Койка2	ПАЛАТА28-Койка3	ПАЛАТА28-Койка4	ПАЛАТА28-Койка5	ПАЛАТА28-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА28-ДУШ	ПАЛАТА28-Присутс	ПАЛАТА28-ВРАЧ
29	ПАЛАТА29	ПАЛАТА29-Койка1	ПАЛАТА29-Койка2	ПАЛАТА29-Койка3	ПАЛАТА29-Койка4	ПАЛАТА29-Койка5	ПАЛАТА29-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА29-ДУШ	ПАЛАТА29-Присутс	ПАЛАТА29-ВРАЧ
30	ПАЛАТА30	ПАЛАТА30-Койка1	ПАЛАТА30-Койка2	ПАЛАТА30-Койка3	ПАЛАТА30-Койка4	ПАЛАТА30-Койка5	ПАЛАТА30-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА30-ДУШ	ПАЛАТА30-Присутс	ПАЛАТА30-ВРАЧ
31	ПАЛАТА31	ПАЛАТА31-Койка1	ПАЛАТА31-Койка2	ПАЛАТА31-Койка3	ПАЛАТА31-Койка4	ПАЛАТА31-Койка5	ПАЛАТА31-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА31-ДУШ	ПАЛАТА31-Присутс	ПАЛАТА31-ВРАЧ
32	ПАЛАТА32	ПАЛАТА32-Койка1	ПАЛАТА32-Койка2	ПАЛАТА32-Койка3	ПАЛАТА32-Койка4	ПАЛАТА32-Койка5	ПАЛАТА32-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА32-ДУШ	ПАЛАТА32-Присутс	ПАЛАТА32-ВРАЧ
91	ПАЛАТА33	ПАЛАТА33-Койка1	ПАЛАТА33-Койка2	ПАЛАТА33-Койка3	ПАЛАТА33-Койка4	ПАЛАТА33-Койка5	ПАЛАТА33-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА33-ДУШ	ПАЛАТА33-Присутс	ПАЛАТА33-ВРАЧ
92	ПАЛАТА34	ПАЛАТА34-Койка1	ПАЛАТА34-Койка2	ПАЛАТА34-Койка3	ПАЛАТА34-Койка4	ПАЛАТА34-Койка5	ПАЛАТА34-ТУАЛЕТ	ПАЛАТА34-ДУШ	ПАЛАТА34-Присутс	ПАЛАТА34-ВРАЧ

Рисунок 1. Главное окно программы «HostCall-NameEditor»

В данном окне можно добавлять и изменять названия помещений и кнопок вызова. В верхней части таблицы находится меню.

Описание меню


Пиктограмма	Назначение
	Создание новой таблицы и очищение старой
	Открытие файла таблиц
	Сохранение файла таблиц
	Сохранение как файла таблиц
	Редактирование шаблона и применение его ко всей таблице.
поле «Порт»	В поле «Порт» выбирается нужное значение COM-порта
	Обновление значений COM-портов в выпадающем списке
	Запуск и остановка работы порта
	Считывание всех данных из табло

	Загрузка всех данных в табло
	Загрузка выбранных данных в табло
	Получение справки о программе

Заполнять таблицу можно как вручную, так и с использованием шаблона.

При заполнении вручную необходимо курсором выделить нужную ячейку таблицы и ввести название.

При заполнении с помощью шаблона необходимо нажать кнопку меню . На экране появится окно редактирования шаблона (рис.2).

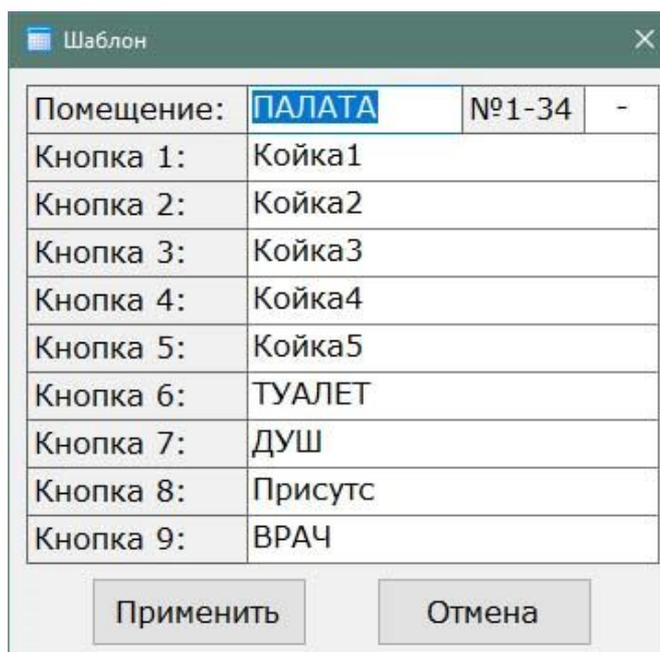

Помещение:	ПАЛАТА	№1-34	-
Кнопка 1:	Койка1		
Кнопка 2:	Койка2		
Кнопка 3:	Койка3		
Кнопка 4:	Койка4		
Кнопка 5:	Койка5		
Кнопка 6:	ТУАЛЕТ		
Кнопка 7:	ДУШ		
Кнопка 8:	Присутс		
Кнопка 9:	ВРАЧ		

Применить Отмена

Рисунок 2. Окно редактирования шаблона

В данном окне следует ввести требуемые названия.

В верхнем правом поле «Разделитель» вводится любой знак, который будет разделять название палаты и название кнопки вызова. Если разделение не требуется, то поле следует оставить пустым.

После заполнения необходимо нажать кнопку **«Применить»**.

Если надпись в ячейке таблицы будет содержать более 16 символов, то эта ячейка будет выделена желтым цветом.

После заполнения таблицы необходимо в поле «Порт» выбрать нужное значение СОМ-порта. Если нужный СОМ-порт подключен, но его значение в выпадающем списке

отсутствует, то необходимо нажать кнопку меню  и выбрать его. Затем запустить

работу выбранного СОМ-порта, нажав кнопку меню . Для остановки работы СОМ-

порта необходимо нажать кнопку меню .

Для загрузки всех заполненных названий в память табло необходимо нажать кнопку меню . Для загрузки только выбранных заполненных названий необходимо нажать

кнопку меню  . На экране появится окно загрузки данных в табло (рис.3.), показывающее процесс загрузки.

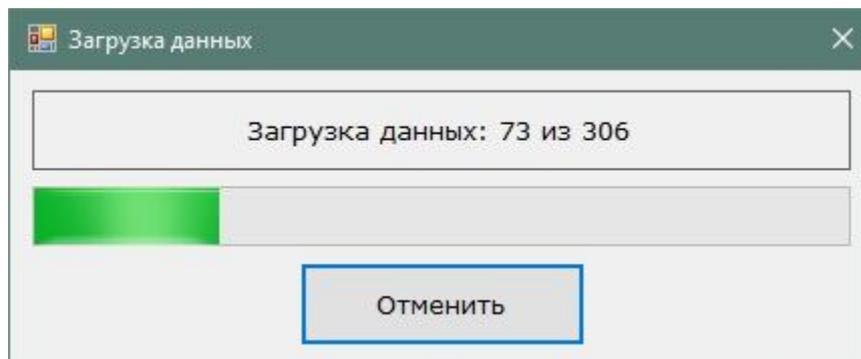


Рисунок 3. Окно загрузки данных в табло

Если в процессе загрузки данных в табло произошел какой-то сбой, то на экране появится окно с сообщением об ошибке.

Если необходимо считать уже загруженные в табло данные, необходимо нажать кнопку меню  . На экране появится окно считывания данных из табло (рис.4), показывающее процесс считывания. Считывание данных из табло происходит построчно.

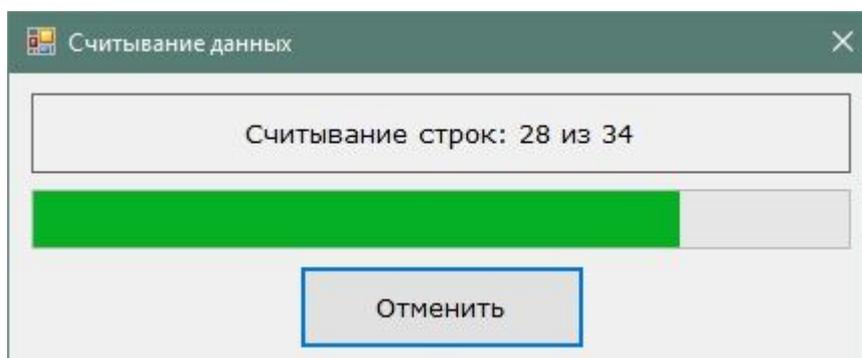


Рисунок 4. Окно считывания данных из табло

Считывание и загрузка данных возможны только при включенном COM-порте.

Для получения справки о программе необходимо нажать кнопку меню  . На экране появится окно справки о программе, в котором указана версия данной программы (рис.5).

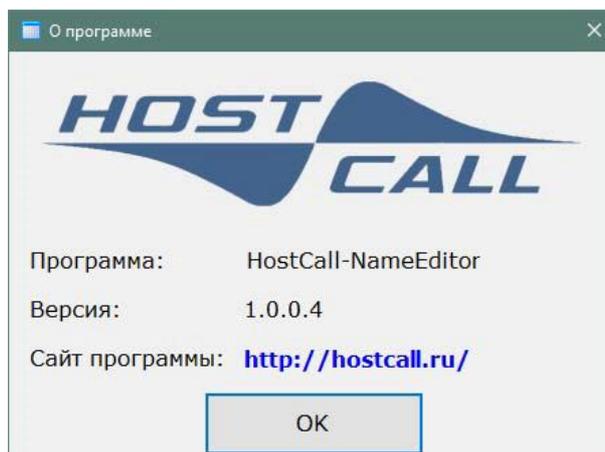


Рисунок 5. Окно справки о программе

Для выхода из программы следует нажать значок **X** правом верхнем углу.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

СИСТЕМЫ СВЯЗИ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Директорская, диспетчерская связь
- Офисные АТС
- Селекторы
- Переговорные устройства
- Системы палатной сигнализации и связи для больниц
- Озвучивание конференц-залов
- Системы громкого оповещения и трансляции
- Системы записи переговоров
- Системы контроля доступа
- Компоненты систем видеонаблюдения
- Аудио и видео домофоны
- Телефонные аппараты (в том числе без номеронабирателя)
- Факсы
- Источники бесперебойного питания
- Кроссовое оборудование
- Кабели, монтажные материалы
- Монтаж, сервис

Тел./факс: (495) 120-48-88
<http://www.telsi.ru>
e-mail: info@telsi.ru